

Controle bacteriano nos implantes e conexões!

proheal



Elimine os gaps de sua conexão!



Proheal aplicado na conexão do componente.

Onde usar:

Em todos os componentes cirúrgicos e protéticos de todos os tipos de conexões dos implantes dentais.



Controle bacteriano nos dentes provisórios, mock-ups e fios de sutura

A aplicação na superfície externa dos dentes provisórios e nos dentes naturais, sob o mock-up, evita a aderência bacteriana, elimina o mau odor e melhora sensivelmente a saúde do periodonto.

Como aplicar:

Aplique o produto nas conexões de todos os componentes devidamente secos. Ao instalar o componente, observe se o produto extravasou e ocupou todos os gaps da conexão.




Retire o produto da seringa, depositando-o em um recipiente.



Colha uma porção com os dedos e aplique no local desejado.



Aplicação no componente.

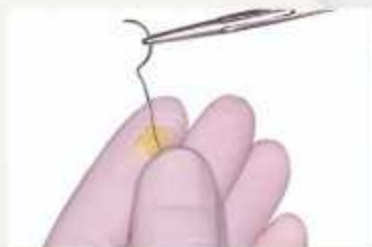

Aplicação no fio de sutura.



Aplicação nos dentes provisórios.



Aplicação nos dentes sob o mock-up ou em outras superfícies.