

INSTRUÇÕES DE USO FIO DE NYLON MONOFILAMENTADO AGULHADO

FINALIDADE E INDICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Efetuar o fechamento de incisões cirúrgicas, auxiliando o processo de cicatrização dos tecidos.

Indicado para procedimentos Cuticular (fechamento de pele), Fechamento Geral Obstetrícia e Ginecologia, Vascular, Microcirurgia, Plástica, Odontologia e Oftalmologia.

COMPONENTES ESSENCIAIS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:

As suturas não absorvíveis de nylon monofilamentado agulhado, são encontradas nas cores preta ou incolor, nos comprimentos 0,13m a 2,4m, com diâmetros que variam do número cirúrgico 1 ao 11-0.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES ESSENCIAIS.

Fio: monofilamento de poliamida PA6, imputrescível, alta resistência aos agentes atmosféricos e 100% atóxico.

Agulha: aço inoxidável AISI, com revestimento siliconizado, de diversos tamanhos, curvatura e Bisel, encastoadas em uma ou ambas extremidades do fio cirúrgico.

ORIENTAÇÕES ADEQUADAS PARA O USO CORRETO E SEGURO DO PRODUTO:

Aplica-se nas Bordas das incisões cirúrgicas, utilizando as técnicas segundo critério médico.

CUIDADO NA APLICAÇÃO:

Tensionar antes de usar, procurar não esmagar ou deformar o fio de sutura ao utilizar o porta-agulhas.

QUANDO APLICÁVEL, A PALAVRA “ESTÉRIL”

Estéril

ESCLARECIMENTOS, PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS COM O PRODUTO:

É recomendado que ao manusear este ou qualquer outro material de sutura, tome-se o cuidado para evitar danos de manuseio. Evitar amassar ou enrugar ao usar junto com instrumentos cirúrgicos, tais como pinças ou porta-agulhas.

Como qualquer material de sutura, a garantia de nós adequados requer técnicas cirúrgicas aceitáveis de laços simples e duplos, com laçadas adicionais asseguradas pelas circunstâncias cirúrgicas e pela experiência do cirurgião.

Recomenda-se que a embalagem seja aberta imediatamente antes do uso para minimizar a possibilidade de contaminação, tomar cuidado para que seja feito sempre de modo asséptico.

O Fio nylon monofilamentado agulhado não deve ser utilizada após seu prazo de validade.

O envelope transparente (grau cirúrgico – interno) garante a esterilidade do produto, desde que não aberto ou danificado.

Estas embalagens não devem ser autoclavadas.

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada;

Conservar o produto em ambiente seco e fresco, livre de luz solar direta e umidade;

Uso exclusivo por médicos no fechamento de tecidos em cirurgias;

Produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único.

Produto não fervível;

Produto esterilizado a uma dose de 20 KGY de raio Gama-Cobalto.

CONTRA INDICAÇÃO:

O fio de Nylon é contraindicado para uso no sistema nervosos central e no sistema circulatório central.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO.

O fio de nylon monofilamentado agulhado está disponível na seguinte apresentação:

Cartuchos contendo 24 unidades de acordo com o produto.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO

Considerando.

DESCARTE DO PRODUTO

Risco de Contaminação Biológica. Adote procedimentos internos de descarte, levando em conta o risco de contaminação. Descarte de dispositivo não usado pode ser destinado à reciclagem ou lixo comum (papel/plástico: embalagem).

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar o produto a uma temperatura em torno de 30°C variação de mais ou menos 2°C, com umidade em torno de 60% e ao abrigo da luz direta.

ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE

Esterilizado por Radiação Gama.

Válido por 05 anos a partir da data de fabricação, se mantida a integridade da embalagem.

Fabricante:

BIOLINE FIOS CIRÚRICOS LTDA

CNPJ 37844479/0001-52

Av. Maranhão nº 500 – Bairro Jundiáí

Anápolis/GO. CEP 75110-470

Fone: 55 (62) 3324-2120

contato@biolinefios.com.br

www.biolinefios.com.br

Indústria Brasileira

R.M.S.: 10426020004

Responsável Técnico: Alexandre Faria Vasconcelos

CRQ XII 12200147

Distribuído por:

LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A. | Aesculap

Av. Eugênio Borges, 1092, Arsenal | São Gonçalo | RJ | 24751-000

CNPJ. 31.673.254/0001-02 | Indústria Brasileira.

Aesculap –a B.Braun Company